



El prodigio

EncorePro 2, la nueva generación: gestión de pacientes de nivel superior.

PHILIPS

RESPIRONICS

Mejoras en un funcionamiento ya acreditado


EncorePro 2, más inteligente pero menos complejo, mejora su capacidad para gestionar a los pacientes y su negocio.

Características demandadas como la tarjeta de datos Encore, la posibilidad de descargar datos, los informes de cumplimiento y la gestión de las prescripciones se mantienen en este EncorePro de nueva generación. Pero al mismo tiempo hemos mejorado el rendimiento con una funcionalidad más intuitiva y más segura. ¡Lo mejor de lo viejo y lo mejor de lo nuevo a la vez!

EncorePro se ha ganado su respeto y confianza como sistema de gestión de pacientes. Ahora EncorePro 2 cuenta con todo lo que le gustaba y añade más de las características de rendimiento actuales que necesita.




Resumen de cómo contribuye EncorePro 2 a una te

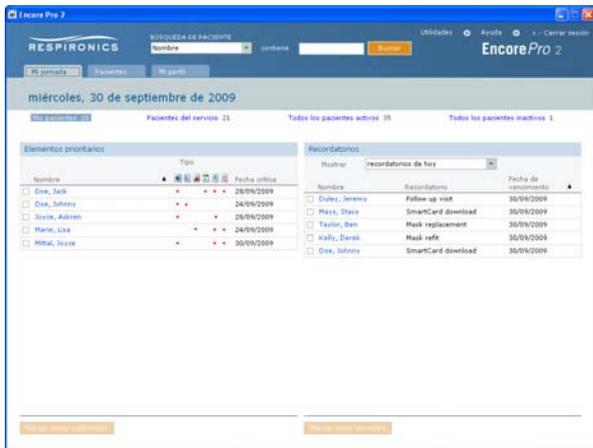

Pestaña mi jornada

La Pestaña mi jornada incorpora notificaciones que identifican de forma automática a los pacientes mas problemáticos y sus necesidades específicas. Con esa información, los usuarios pueden priorizar rápida y fácilmente las necesidades de intervención. También recuerda al usuario las actividades que se deben llevar a cabo ese día a través de los recordatorios para el paciente programados. Se pueden filtrar los recordatorios para ver los pendientes en los cinco días posteriores o ver todos los recordatorios.

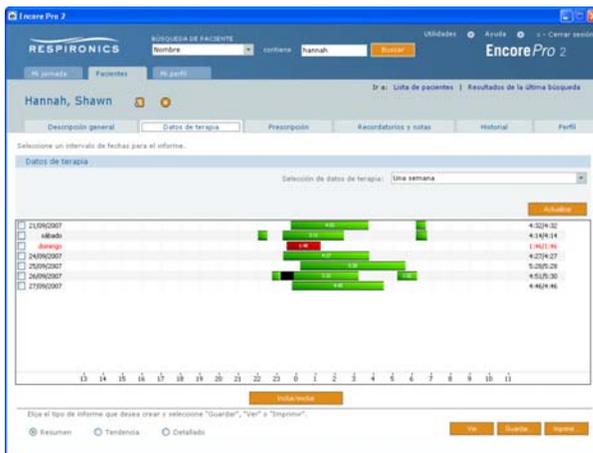

Pestaña de datos de terapia

La Pestaña de datos de terapia de la ventana de informe del paciente permite al usuario ver y generar informes sobre el cumplimiento del paciente y los datos de la terapia. Se pueden generar resúmenes, tendencias e informes detallados.



Indica IAH por encima del límite fijado



Indica fuga excesiva



Indica pocas horas de uso




Indica días de uso insuficientes



Indica el índice de apnea con vías respiratorias despejadas por encima del límite fijado




Indica el porcentaje de tiempo en respiración periódica por encima del límite fijado

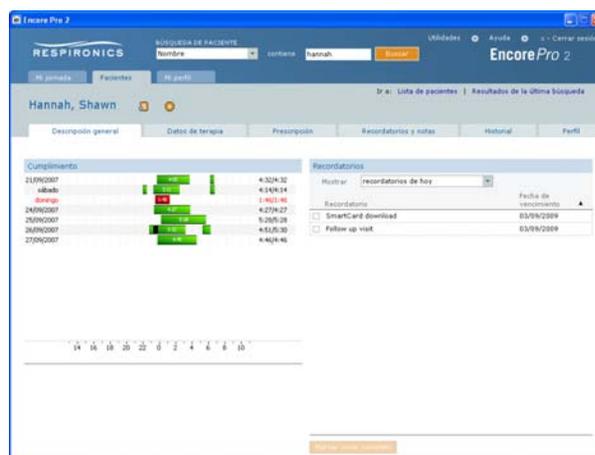


Pestaña de descripción general

La Pestaña de descripción general permite al usuario ver y modificar las actividades del paciente. Incluye un resumen rápido del cumplimiento del paciente y los recordatorios.

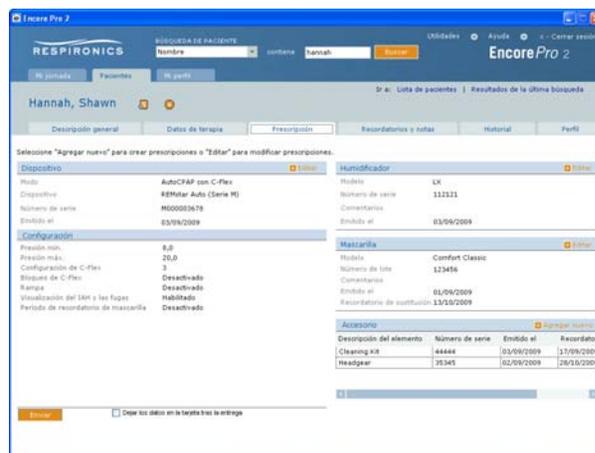


Pestaña de prescripción

La Pestaña de prescripción permite al usuario crear o modificar las prescripciones sobre dispositivo, humidificador, mascarilla y accesorios. Se puede enviar la prescripción a la tarjeta de datos de Respirationics para desde allí actualizar la prescripción en el dispositivo de un paciente. Se pueden crear recordatorios para la sustitución de la mascarilla y los accesorios.

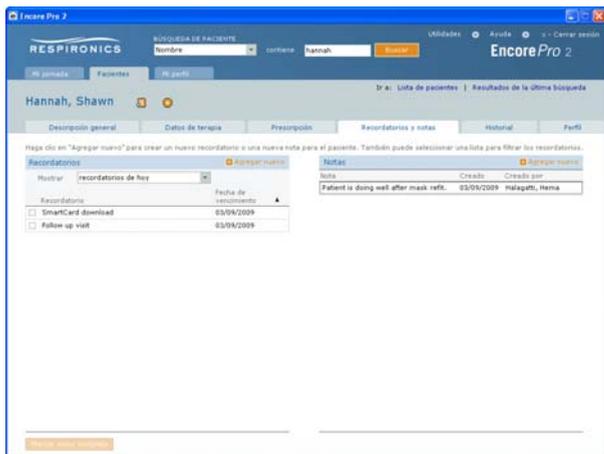

Pestaña de recordatorios y notas

La Pestaña de recordatorios y notas del resumen de informe del paciente permite al usuario crear, gestionar y filtrar los recordatorios para el paciente. También se pueden añadir y registrar notas para el paciente.

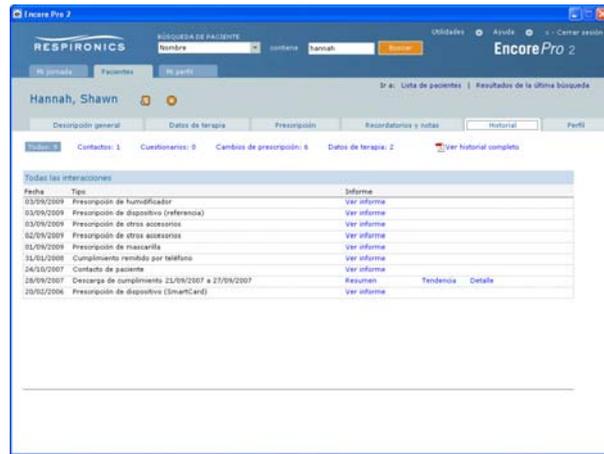


Pestaña de historial

La Pestaña de historial de la ventana de informe del paciente muestra un resumen de las interacciones previas con el paciente en orden cronológico y permite al usuario generar un informe de una única interacción o de todas las interacciones. Dichos informes se pueden exportar a un archivo en formato Excel o en PDF. El historial del paciente contiene los siguientes tipos de interacción:

- Contactos
- Descargas de datos sobre la terapia
- Cuestionarios: FOSQ 30 o Epworth
- Cambios en la prescripción

El usuario puede también filtrar las interacciones por tipos de interacción, introducir un contacto nuevo o descargar los datos de la terapia.

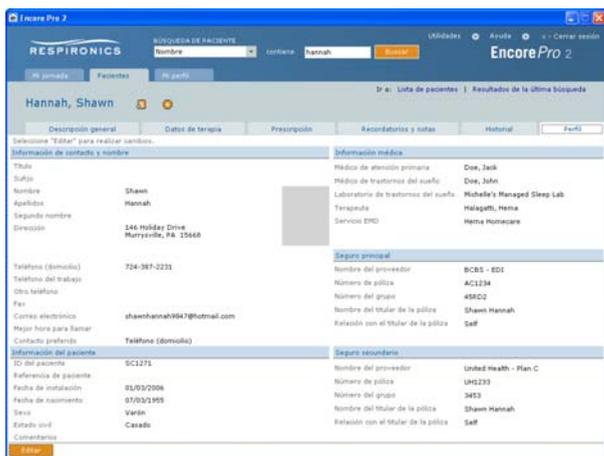

Pestaña de perfil

La Pestaña de perfil permite al usuario ver y modificar los datos demográficos del paciente.

Información para pedidos	
EncorePro 2 y tarjeta SmartCard	Número de parte
Software EncorePro 2	1054785
Unidad USB de lectura/escritura para tarjeta SmartCard	1014352
Tarjeta SmartCard de lectura/escritura para PCMCIA	1014353
Tarjetas Encore SmartCard (paquete de 10 tarjetas)	1003304
Lector de tarjetas SD	1047300
Cubierta para tarjeta SD (acoplada al dispositivo)	1063858
Tarjetas SD (paquete de 10)	1063859
Sobres para tarjeta SD (paquete de 10)	1066785
Accesorios	
Número de parte	
Manual de informes Encore, en inglés (otros idiomas disponibles previa solicitud)	1065969
Guía del usuario EncorePro 2	1060291
Guía de instalación y administración EncorePro 2	1054258
Copia clínica del FOSQ 30	1000141
Cuestionario FOSQ 30, en inglés (Otros idiomas disponibles previa solicitud)	1004550
Escala de Epworth para la somnolencia (cuadernillo de 50 hojas)	1058362

Descubra cómo EncorePro 2 le ofrece una solución aún más inteligente

Asombrosamente sencillo

Una interfaz del usuario simplificada con la que EncorePro es más valioso que nunca:

- Más fácil de usar, más fácil de entender
- Sistema de navegación de pestaña única para encontrar datos de forma más intuitiva
- Su funcionalidad fácil de usar simplifica la formación

Inteligente y proactivo

Para permitirle tratar de forma más eficaz a sus pacientes el nuevo EncorePro proporciona información crítica sobre el paciente de las siguiente maneras:

- Notificaciones que le ayudan a identificar a los pacientes que requieren atención
- Recordatorios para el paciente, avisos sobre sustitución de mascarillas/ accesorios y avisos de seguimiento que podrá configurar fácilmente
- La documentación y el seguimiento de las interacciones con el paciente
- La tarjeta de datos Encore, con la que podrá descargar fácilmente los datos sobre la terapia y hacer cambios en la prescripción
- Generar con rapidez resúmenes del paciente, información sobre tendencias e informes de terapia pormenorizados

Notablemente eficaz


Ahora EncorePro no sólo le proporciona datos del paciente inteligentes, sino que también le ayuda con la dinámica de trabajo:

- Modos de recogida con tarjeta de datos Encore y transmisión telefónica de datos sobre el cumplimiento terapéutico
- Los parámetros se pueden organizar según las preferencias o necesidades del centro o la información personal

Seguro y confidencial

EncorePro le ayuda a cumplir los requisitos sobre confidencialidad de los datos del paciente, cada vez más estrictos:

- El nombre de usuario y la contraseña impiden el acceso no autorizado
- Base de datos con seguridad
- Actividades administrativas accesibles sólo para usuarios autorizados
- Registro de la actividad en la base de datos

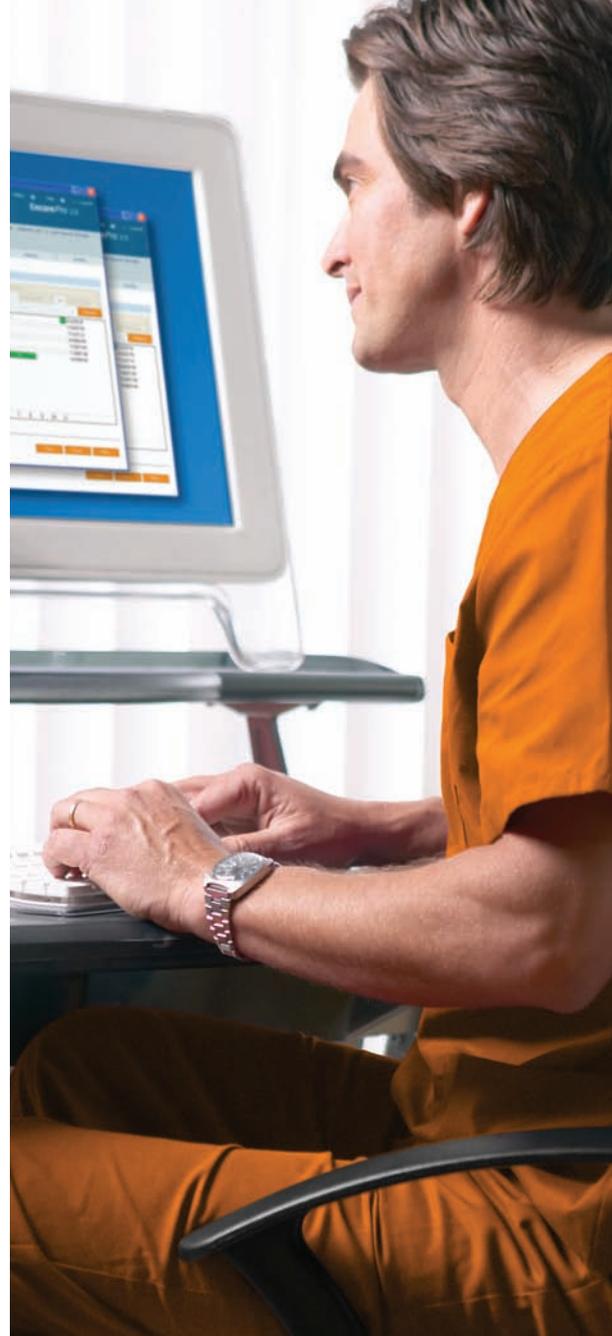

Requisitos del sistema recomendados:

- Windows® XP Professional SP2, XP Home SP2, Windows Vista® Business SP1, Vista Home SP1, Vista Ultimate SP1 o Windows Server® 2003 SP2
- Microsoft® .NET framework 3.5 SP1 o posterior
- Microsoft SQL Server 2008
- Windows Installer 4.5 o posterior
- Procesador con velocidad de 1 GHZ o más
- 1 GB de RAM
- Disco duro de 40 GB con al menos 5 GB de espacio disponibles
- Puerto USB o PCMCIA
- Unidad de CD o DVD-ROM
- Impresora en color o en blanco y negro compatible con Windows
- Adaptador de vídeo y monitor con resolución mínima de 1.024 x 768

**Philips Healthcare forma parte de
Royal Philips Electronics**

Contacte con nosotros en

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
fax: +31 40 27 64 887

Asia
+852 2821 5888

Europa, Oriente Medio, África
+49 7031 463 2254

Latinoamérica
+55 11 2125 0744

Estados Unidos
+1 425 487 7000
800 285 5585 (toll free, US only)

Philips Respiroics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)

Respiroics Asia Pacífico
+65 6882 5282

Respiroics Europa, Oriente Medio, África
+33 1 47 52 30 00

www.philips.com/respiroics

Respiroics, Encore y SmartCard son marcas registradas de Respiroics, Inc. y empresas afiliadas. Microsoft, Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Reservados todos los derechos.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

Broudy KB 12/09/09 MCI 4102679 PN 1065908